

人工鼻について (2)

人工鼻は、何でできているの？

人工鼻（HME：Heat and Moisture Exchanger）の中身は繊維紙やスポンジなどです。




人工鼻は…

患者さんの呼吸状態に左右されやすいものです。頻呼吸（呼気が少ない）では十分な加温と加湿が行なわれません。そして痰が固形化してきます。

人工鼻使用時は、患者さんの状態観察と痰の状態を観察が大切になります。

人工鼻を使用した場合

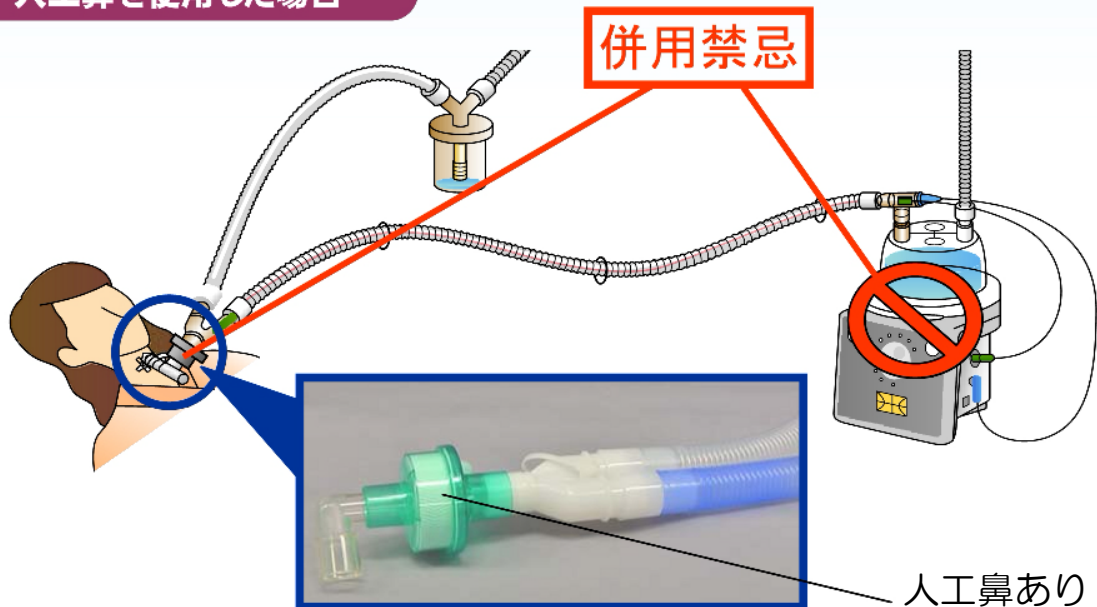

加温加湿器と併用は禁忌です！

人工鼻は加温加湿器と併用して使用すると過度の加湿により、流量抵抗が増大したり、人工鼻が**閉塞して換気ができなくなる**ことがあります。また人工呼吸器の低圧アラーム値設定によっては、回路外れやリークが発生しても**低圧アラームが鳴らなくなる可能性**があります。