



医療安全通信

平成22年度 第3号 2010年10月15日 医療安全管理室

医療用・介護ベッドで こんな事故が起きています

No 1

すき間に首が入り込む事故が多発しています。



- ・ヘッドボードと再度レールの隙間をクッションなどを入れて埋めましょう。
- ・サイドレールとサイドレールの間に挟まらないよう工夫しましょう。(メーカーにより専用器具あり)

しっかり固定していないと・・・
立ち上がるときに転倒し骨折の原因になります。



・首振り機構の固定、ベッドへの固定を確実にを行う。

12cm以上のすき間があると・・・
サイドレールの中に頭が入り、窒息事故が発生しています。



サイドレールカバー、ベッド用グリップカバーなど利用する。
(メーカーにより専用器具あり)

取扱説明書をよく読んで
正しく使いましょう。



下記のスケールですき間を確認しましょう



