




医療安全通信

平成21年度 第3号 2010年1月15日 医療安全管理室

注意!

サイフォニング現象

シリンジとエクステンションチューブ先端の高さが違いすぎると**高低落差**によってシリンジ内の薬剤が、**自然に注入**されるサイフォニング現象が起こることがあります。シリンジポンプ使用時に注意しなければなりません。

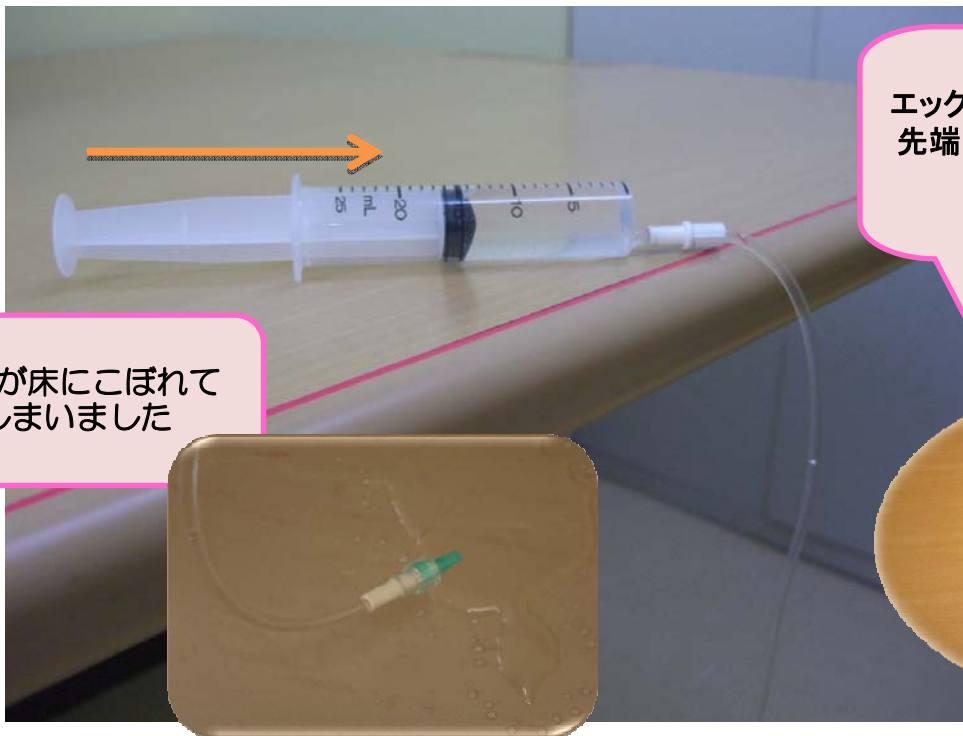

エクステンションチューブの先端にはキャップがしっかりついていました

薬液が床にこぼれてしまいました

シリンジポンプは薬液を微量で正確に注入するための機器です。従って、このような事が起こると**大事故**につながります。セッティングをする際には確実に行いましょう!

